

Anleitung:

1. Nehmen Sie den Pulse Oximeter
2. Drücken Sie den Anschaltknopf (1) für ein paar Sekunden
3. Das Display erwacht
4. Auf „Push“ drücken, der Clip öffnet sich
5. Auf den Zeigefinger stecken und den Clip wieder schließen
6. Nach paar Sekunden können Sie die Werte ablesen
7. Nach dem Abziehen vom Finger erlischt die Displayanzeige nach einigen Sekunden

SpO2: = Sättigungsgrad des Bluts (2)

- Alle Werte oberhalb < 93 sind i.O. (Höhenmeter bis 1500m)
- Dieser Prozentsatz sagt aus, wie viele rote Blutkörperchen Sauerstoff im Körper transportieren.

Puls PRbpm: (3)

- Ablesen

Pi %: (4)

- numerischer Wert, der dem pulsatischen Blutfluss an der Sensorposition entspricht
- Bei Werten über 4 % wird die Messung als verlässlich betrachtet

